

H₂/CH₄ BREATH TEST AL LATTULOSIO

TEST PER LA DETERMINAZIONE DI SIBO (SOVRACRESCITA BATTERICA NELL'INTESTINO TENUE) E DEL TEMPO DI TRANSITO ORO-CECALE (OCTT)

- ◆ Non invasivo
- ◆ Di semplice esecuzione
- ◆ Specifico
- ◆ Sensibile
- ◆ Adatto ai bambini

Principio

Il tempo di transito oro-cecale (OCTT) è il periodo di tempo tra il momento in cui si ingerisce del cibo e il momento in cui il cibo stesso raggiunge l'intestino cieco. In condizioni normali, il lattulosio (zucchero indigeribile costituito da fruttosio e galattosio) somministrato, non viene idrolizzato fino al raggiungimento del colon, dove è fermentato dai batteri presenti, con produzione di gas, in particolare idrogeno (H₂) e metano (CH₄). I gas prodotti, sono assorbiti dalle pareti del colon, passano nel circolo sanguigno, raggiungono gli alveoli polmonari e sono espulsi col respiro. Si osserva, di conseguenza, un aumento della concentrazione di H₂ e/o CH₄ nell'espirato. Il tempo che intercorre tra la somministrazione della dose di substrato e il picco di gas misurato è l'OCTT. La flora microbica presente nell'intestino crasso, in certe condizioni, prolifera così tanto da colonizzare anche l'intestino tenue. Di conseguenza, aumentano i gas intestinali prodotti dalla fermentazione intestinale ed il picco di H₂ e/o CH₄ è precoce. In condizioni normali, inoltre, nell'intestino tenue è presente un bilanciamento tra le specie batteriche che compongono la flora batterica, scarsamente concentrata, tale da non fermentare il lattulosio. Non è così rilevabile un aumento della concentrazione di H₂ e/o CH₄. L'incremento della flora batterica intestinale a livello del tenue, in certe condizioni, rompe l'equilibrio. I batteri competono con i normali processi digestivi e metabolizzano il substrato prima che venga assorbito. Un aumento dei gas nell'espirato indica la presenza di una sovra crescita batterica (SIBO-Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

Esecuzione

1. Prelevare espirato basale (tempo 0) prima della somministrazione del substrato (lattulosio): il paziente deve soffiare nella sacca mediante l'apposito boccaglio fino a che la stessa sia piena di aria; contrassegnare la sacca con n.1 sul retro dello stantuffo.
2. Somministrare al paziente il lattulosio, diluito in 200 ml di acqua naturale;
3. Nelle 4 ore successive, prelevare l'espirato ogni 15 minuti (ulteriori 16 misurazioni) contrassegnando ogni sacca con il numero corrispondente al numero di "soffio" eseguito;
4. Compilare la "scheda tecnica" con i dati del paziente, il nominativo del medico richiedente e l'e-mail per la ricezione del referto.

Interpretazione dei risultati

In condizioni NON patologiche, l'OCTT è compreso tra 40 e 170 minuti. L' "H₂/CH₄ breath test" al lattulosio è usato per determinare la SIBO (sovracrescita batterica nell'intestino tenue).

Durata: 4 ore